

JOY

by Motiva®





Postupný vývoj našich implantátů



Motiva®
Round



Motiva
Ergonomix®



Motiva
Ergonomix2®

Technologie	Motiva® Round <ul style="list-style-type: none"> • TrueMonobloc® • ProgressiveGel® PLUS • BluSeal® • SmoothSilk®/SilkSurface® 	Motiva Ergonomix® <ul style="list-style-type: none"> • TrueMonobloc® • ProgressiveGel ULTIMA® • BluSeal® • SmoothSilk®/SilkSurface® 	Motiva Ergonomix2® <ul style="list-style-type: none"> • Motiva SuperSilicones® • TrueMonobloc+® • ProgressiveGel Ultima® • BluSeal+® • SmoothSilk®/SilkSurface® 	
	Zahrnuje	<ul style="list-style-type: none"> • Zásady pro výměnu produktů • Záruka Always Confident Warranty® 	<ul style="list-style-type: none"> • Zásady pro výměnu produktů • Záruka Always Confident Warranty® 	<ul style="list-style-type: none"> • Program JOY® • Program Motiva Woman's Choice® • 5letá prodloužená záruka • Implantát s technologií RFID (Qid®) • Zásady pro výměnu produktů • Záruka Always Confident Warranty®
	Doplňky	<ul style="list-style-type: none"> • Implantát s technologií RFID (Qid®) • Motiva MinimalScar® • 2letá prodloužená záruka* • 5letá prodloužená záruka** 	<ul style="list-style-type: none"> • Implantát s technologií RFID (Qid®) • MotivaHybrid® • Motiva MinimalScar® • 2letá prodloužená záruka* • 5letá prodloužená záruka** 	<ul style="list-style-type: none"> • MotivaHybrid® • Motiva MinimalScar®

*Doplňková možnost pro implantáty bez Qid

**Doplňková možnost pro implantáty s Qid



Bezpečnostní prvky Ergonomix2[®]



Motiva SuperSilicones[®]

Nové složení pro lepší ergonomii s vylepšenými mechanickými vlastnostmi.¹



ProgressiveGel Ultima[®]

Gel s unikátním souborem reologických vlastností, který se lépe přizpůsobuje pohybu než jiné testované silikonové gely a připomíná pohyblivost přirozené tkáně.¹



TrueMonobloc+[®]

Patentovaný vícevrstvý systém, který sjednocuje strukturu implantátu a umožňuje jeho ohýbání a stlačování.¹



SmoothSilk[®]/SilkSurface[®]

Vylepšený a pokročilý hladký povrch, který zlepšuje biokompatibilitu.²



BluSeal+[®]

Lehce zabarvená modrá bariérová vrstva vyrobená pomocí biokompatibilních barviv, která umožňuje její vizuální kontrolu před operací.¹



RFID-enabled Implant

Bezbatériové a pasivní radiofrekvenční identifikační zařízení, které bezpečně uchovává sériové číslo a související informace o vašich implantátech.³

Motiva SuperSilicones®

Kvalita pláště prsních implantátů je základním bezpečnostním prvkem a je také klíčem k zajištění pružnosti a dalších mechanických vlastností, které jsou pro výkonnost implantátu klíčové.*

S implantáty Ergonomix2® představuje Motiva® nové složení silikonu a konfiguraci pláště, která zlepšuje možnosti jeho prodloužení¹⁵ a zvyšuje schopnost přizpůsobit se změnám.

Proč je to důležité? Schopnost snadného ohýbání je nezbytná pro zavedení implantátu prostřednictvím malých řezů. Ergonomix2® je implantát určený k vylepšení minimálně invazivních technik, jako je např. Motiva MinimalScar®.



TrueMonobloc+®

Tato vlastnost je patentovanou technologií, která spojuje komponenty pláště a výplňového gelu a vytváří tak soudržnější strukturu.¹

Interakce mezi jedinečnými vlastnostmi komponentů systému Ergonomix2® maximalizuje jeho adhezní vlastnosti a zároveň propůjčuje systému větší flexibilitu a přizpůsobivost. To dalo vzniknout vylepšené verzi s názvem TrueMonobloc+®.

Implantáty Ergonomix2® lze stlačit do větší míry než naše spolehlivé, vysoce výkonné implantáty Ergonomix®, což usnadňuje jejich zavádění prostřednictvím menších řezů.⁶

BluSeal+®

Po více než třech desetiletích vedl technologický pokrok k výraznému zlepšení opatření proti uvolňování silikonu z prsních implantátů.⁷

Naše bezpečnostní bariérová vrstva je jedinečná svého druhu. Je to lehce zabarvená, modrá bariérová vrstva vyrobená pomocí biokompatibilních barviv, která umožňuje její vizuální kontrolu před operací.¹

BluSeal+® dále zlepšuje výkonnost již tak vynikajícího bezpečnostního prvku.⁸



ProgressiveGel Ultima®

Podobnost s dynamikou přirozené tkáně byla klíčovým chybějícím faktorem tradičních implantátů, a to kvůli jejich předem definovanému tvaru, který zůstává nezměněn, ať už pacientka stojí, je předkloněná nebo leží.

Motiva® začleňuje tuto organickou pohybovou charakteristiku do technologie Ergonomix2®. Ta díky jedinečným viskoelastickým vlastnostem gelu Ultima® udržuje kulatý tvar, když pacientka leží, a vytváří přirozeně vypadající tvar slzy, když stojí.⁹

Výsledkem je gel s unikátním souborem vlastností, který se lépe přizpůsobuje pohybu než jiné testované silikonové gely a připomíná pohyblivost přirozené tkáně.¹

SmoothSilk®/ SilkSurface®

Pokročilý hladký povrch navržený pro zvýšení biokompatibility.²

Ergonomix2® se dodává s rovnoměrným povrchem SmoothSilk®/SilkSurface®, navrženým a odzkoušeným s cílem:

- Zmírnění zánětlivé a fibrotické reakce vašeho těla.¹⁰
- Omezení bakteriální zátěže, což snižuje riziko tvorby biofilmu.¹¹
- Snížení výskytu chronických zánětlivých komplikací, jako jsou dvojité kapsuly a pozdní seromy.¹²



RFID-enabled Implants

Elektronické sériové číslo (ESN) a související informace o vašich implantátech jsou bezpečně uchovávány prostřednictvím pasivního radiofrekvenčního identifikačního zařízení bez baterií: našeho řešení Qid®.

Tato první bezpečnostní technologie svého druhu umožňuje vašemu poskytovateli zdravotní péče použít externí ruční čtečku ke zjištění podrobností o vašich implantátech Motiva po operaci, i když nemáte k dispozici vytištěnou identifikační kartu implantátu.

Vy jste prioritou číslo jedna!

Vaše bezpečnost a spokojenost jsou středobodem programu JOY®.

Proto je součástí programu prodloužená záruka Motiva
a v odvětví zcela nová iniciativa zaměřená na pacienty:

Woman's Choice Program®.



wcp

MOTIVA WOMAN'S CHOICE PROGRAM

Unikátní program Motiva Woman's Choice Program® poskytuje finanční podporu v případě, že se ženy, které obdrží implantáty Ergonomix2 v rámci programu JOY, rozhodnou do dvou let od provedení implantace pro reverzní operaci, a to za předpokladu, že splňují stanovené doplňkové podmínky.

Pro bližší informace
o podmínkách uvedeného
programu načtete tento QR kód:



Nezapomeňte, že pro aktivaci programu
Woman's Choice musíte své implantáty
zaregistrovat během prvních 90 dnů po operaci.

Pro registraci načtete
tento QR kód:



Záruka Always Confident Warranty® a Zásady pro výměnu produktů

Na všechny implantáty Motiva se vztahuje naše záruka Always Confident Warranty® proti prasknutí po dobu životnosti implantátů, jakož i naše Zásady pro výměnu produktů.

Další informace včetně výhod a podmínek naleznete na:



5letá prodloužená záruka

JOY je jediný program Motiva, který vám nabízí naši pětiletou prodlouženou záruku bez dodatečných finančních nákladů.

Chcete-li jej aktivovat, musíte své implantáty zaregistrovat během prvních 90 dnů po operaci.


Pro bližší informace o našich záručních podmínkách načtete tento QR kód:



Velikost vhodná pro každého:
Ergonomix2[®] je navržen tak,
aby vám ideálně vyhovoval.

Program JOY

Implantáty Motiva Ergonomix2® - Tabulka velikostí

MINI 				DEMI 				FULL 				CORSÉ 			
Ø _A (cm)	D _B (cm)	V(cc)	Katalogové č.	Ø _A (cm)	D _B (cm)	V(cc)	Katalogové č.	Ø _A (cm)	D _B (cm)	V(cc)	Katalogové č.	Ø _A (cm)	D _B (cm)	V(cc)	Katalogové č.
8.0	2.1	95	E2SM-95Q	8.0	3.0	125	E2SD-125Q	8.0	3.3	135	E2SF-135Q	8.0	3.8	160	E2SC-160Q
8.5	2.2	110	E2SM-110Q	8.5	3.1	150	E2SD-150Q	8.5	3.5	155	E2SF-155Q	8.5	4.0	190	E2SC-190Q
9	2.3	130	E2SM-130Q	9	3.3	170	E2SD-170Q	9	3.7	190	E2SF-190Q	9	4.2	220	E2SC-220Q
9.5	2.4	155	E2SM-155Q	9.5	3.4	195	E2SD-195Q	9.5	3.9	215	E2SF-215Q	9.5	4.5	255	E2SC-255Q
9.75	2.4	165	E2SM-165Q	9.75	3.4	210	E2SD-210Q	9.75	4.0	240	E2SF-240Q	9.75	4.6	270	E2SC-270Q
10	2.5	175	E2SM-175Q	10	3.5	225	E2SD-225Q	10	4.1	250	E2SF-250Q	10	4.8	290	E2SC-290Q
10.25	2.5	180	E2SM-180Q	10.25	3.5	235	E2SD-235Q	10.25	4.2	275	E2SF-275Q	10.25	4.9	320	E2SC-320Q
10.5	2.6	200	E2SM-200Q	10.5	3.6	250	E2SD-250Q	10.5	4.3	290	E2SF-290Q	10.5	5.1	340	E2SC-340Q
10.75	2.6	220	E2SM-220Q	10.75	3.7	270	E2SD-270Q	10.75	4.4	320	E2SF-320Q	10.75	5.2	370	E2SC-370Q
11	2.7	235	E2SM-235Q	11	3.8	285	E2SD-285Q	11	4.5	330	E2SF-330Q	11	5.4	395	E2SC-395Q
11.25	2.7	250	E2SM-250Q	11.25	3.8	295	E2SD-295Q	11.25	4.6	355	E2SF-355Q	11.25	5.5	425	E2SC-425Q
11.5	2.8	260	E2SM-260Q	11.5	3.9	325	E2SD-325Q	11.5	4.7	380	E2SF-380Q	11.5	5.7	455	E2SC-455Q
11.75	2.8	275	E2SM-275Q	11.75	3.9	335	E2SD-335Q	11.75	4.8	400	E2SF-400Q	11.75	5.8	495	E2SC-495Q
12	2.9	290	E2SM-290Q	12	4.0	360	E2SD-360Q	12	4.9	430	E2SF-430Q	12	6.0	530	E2SC-530Q
12.25	2.9	300	E2SM-300Q	12.25	4.0	380	E2SD-380Q	12.25	5.0	450	E2SF-450Q	12.25	6.1	575	E2SC-575Q
12.5	3.0	330	E2SM-330Q	12.5	4.1	405	E2SD-405Q	12.5	5.1	475	E2SF-475Q	12.5	6.3	615	E2SC-615Q
13	3.1	375	E2SM-375Q	13	4.3	450	E2SD-450Q	13	5.3	535	E2SF-535Q	13	6.6	675	E2SC-675Q
13.5	3.2	420	E2SM-420Q	13.5	4.4	500	E2SD-500Q	13.5	5.5	595	E2SF-595Q	13.5	6.9	755	E2SC-755Q
14	3.3	450	E2SM-450Q	14	4.5	545	E2SD-545Q	14	5.7	670	E2SF-670Q	14	7.2	860	E2SC-860Q
14.5	3.4	500	E2SM-500Q	14.5	4.6	605	E2SD-605Q	14.5	5.9	750	E2SF-750Q	14.5	7.5	965	E2SC-965Q
15	3.5	560	E2SM-560Q	15	4.8	660	E2SD-660Q	15	6.1	825	E2SF-825Q	15	7.8	1060	E2SC-1060Q

A=Základna B=Výška V=Objem

Všechny implantáty je možné objednat bez Q Inside® vynecháním „Q“ na konci katalogového čísla.



Zdroje

- 1 Data on file. Establishment Labs®.
- 2 Doloff JC, Veisoh O, de Mezerville R, et al. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. (Topografie povrchu silikonových prsních implantátů ovlivňuje reakci na cizí těleso u myši, králíků a lidí.) *Nature Biomedical Engineering*. (Přírodní biomedicínské inženýrství). 2021;5(10):1115-1130. doi:10.1038/s41551-021-00739-4
- 3 Nelson MT, Brattain KA, Williams JM. Does Electronic Identification Enablement for Silicone Gel Implants Impact Patient Safety? (Má zavedení elektronické identifikace u silikonových gelových implantátů vliv na bezpečnost pacientů?) *J Surg Open Access*. 2018;4(1):1-7. doi:10.16966/2470-0991.162
- 4 Patrick Maxwell G, Gabriel A. Breast implant design. (Design prsních implantátů.) *Gland Surg*. 2017;6(2):148-153. doi:10.21037/gs.2016.11.09
- 5 Establishment Labs. TS-001196. Březen, 2021.
- 6 Establishment Labs. TS-000212. Březen, 2021
- 7 Spear SL, Jespersen MR. Breast implants: (Prsní implantáty:) Saline or silicone? (Fyziologický roztok nebo silikon?) *Aesthetic Surg J*. 2010;30(4):557-570. doi:10.1177/1090820X10380401
- 8 Establishment Labs. TSD-001008. Listopad, 2020.
- 9 Pluris Research Inc. ELABS2. Duben, 2018.
- 10 Quirós MC, Bolaños MC, Fassero JJ. Six-year prospective outcomes of primary breast augmentation with nano surface implants. (Šestileté perspektivní výsledky primární augmentace prsou pomocí implantátů s nano povrchem.) *Aesthetic Surg J*. 2019;39(5):495-508. doi:10.1093/asj/sjy196
- 11 James GA, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney BM. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. (Adheze bakterií a tvorba biofilmu na texturovaných materiálech pláště prsních implantátů.) *Aesthetic Plast Surg*. 2019;43(2):490-497. doi:10.1007/s00266-018-1234-7
- 12 Sforza M, Zaccheddu R, Alleruzzo A, et al. Preliminary 3-Year Evaluation of Experience with SilkSurface and VelvetSurface Motiva Silicone Breast Implants: (Předběžné tříleté hodnocení zkušeností se silikonovými prsními implantáty SilkSurface a VelvetSurface Motiva:) A Single-Center Experience with 5813 Consecutive Breast Augmentation Cases. (Zkušenosti jednoho centra s 5813 po sobě jdoucími případy zvětšení prsou.) *Aesthetic Surg J*. 2018;38:S62-S73. doi:10.1093/asj/sjx15

Jste připravena vydat se na cestu? JOY® na vás čeká.

Sledujte Motiva® na sociálních sítích a navštivte motiva.health, kde najdete další informace o modelaci poprsí se zaměřením na zdraví žen.



chcipsra



chcipsra.cz



Motiva Implants

Načtete tento QR kód a zjistíte více o JOY



Tento materiál je určen pouze pro edukaci pacientů a nepředstavuje lékařskou radu ani doporučení. JOY® označuje program, v jehož rámci jsou nabízeny implantáty Motiva Ergonomix2® se zahrnutými výhodami, jak je popsáno v tomto dokumentu. Záruky, finanční pomoc a/nebo výhody přidané hodnoty jsou bez peněžní hodnoty neplatné, kde je to zakázáno. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Establishment Labs® a všechny uvedené produkty jsou vyráběny a distribuovány společností Establishment Labs® a jejími autorizovanými obchodními partnery. Doplnující informace o produktu najdete na etiketě nebo v návodu k použití jednotlivých produktů. Prodej a dostupnost produktu může být v některých zemích / oblastech omezena. Tento materiál nesmí být kopírován ani přetiskován bez výslovného písemného souhlasu společnosti Establishment Labs®. ELJOY-005-0222 Rev3. ©2022 Establishment Labs®. Všechna práva vyhrazena.

JOY by Motiva®

JOY

by Motiva®

